

Système de filtrage automatisé conçu pour compléter votre processus de vérification en pharmacie, améliorant ainsi l'efficacité et la productivité globales de vos opérations d'emballage de médicaments oraux solides

Le système FastPak Verify est un système de filtrage conçu pour inspecter visuellement le contenu des emballages en sachet produits par le système d'emballage automatisé FastPak Elite. Cet outil de flux de travail compact améliore l'efficacité de votre processus de vérification des médicaments oraux solides en pharmacie.

En raison de notre engagement à mettre l'accent sur l'assurance de la qualité du processus d'emballage, le système FastPak Verify inspecte visuellement le contenu des doses en chapelet produites par le FastPak Elite et analyse la couleur, la forme, la taille et la quantité du contenu de chaque sachet. La polyvalence du système FastPak Verify vous permet de spécifier la quantité de produits à vérifier en fonction de la complexité de votre flux de travail global en matière d'emballage.

En plus de permettre à la pharmacie d'attester de la conformité du contenu de l'emballage et du moment de son emballage, le système FastPak Verify autorise un accès facile à des données statistiques, vous procurant ainsi des renseignements historiques des inspections effectuées pour que vous puissiez revoir les erreurs et identifier les tendances.



(Illustré avec un écran de révision d'erreurs potentielles.)

Flux de travail FastPak Verify



Spécifications	
Dimensions	28 po (larg.) x 25 po (prof.) x 28 po (haut.) (51 po (haut.) avec table)
Poids	Moins de 200 lb
Couleur	Gris
Alimentation	115V
Consommation d'énergie	300W
Certification	cMET
Débit	Jusqu'à 45 sachets par minute
Emballages pris en charge	Emballages étroits et larges FastPak Elite
Capacité maximale par sachet	25 médicaments oraux solides



Exemple d'écran de résumé de lot

Bobinoir

Pour améliorer davantage votre flux de travail, un bobinoir offert en option permet d'emmagasiner avec soin de longues bandes de sachets de lots et de les dévider dans le système FastPak Verify. Les commandes de fonctionnement simples du bobinoir facilitent son utilisation. Des capteurs laser contrôlent le démarrage et l'arrêt, empêchant les bandes de s'affaisser en mode automatique. Le mode manuel vous permet d'enrouler et de dérouler les bandes de sachets au besoin. Des bobines supplémentaires facilement interchangeables sont également offertes.



Bobinoir

**Communiquez avec nous dès aujourd'hui
pour obtenir plus de détails!**

ARxIUM.com | 888-537-3102 | info@ARxIUM.com